


doporučujeme

We bring good *shapes* to life

UNICONE

time for change

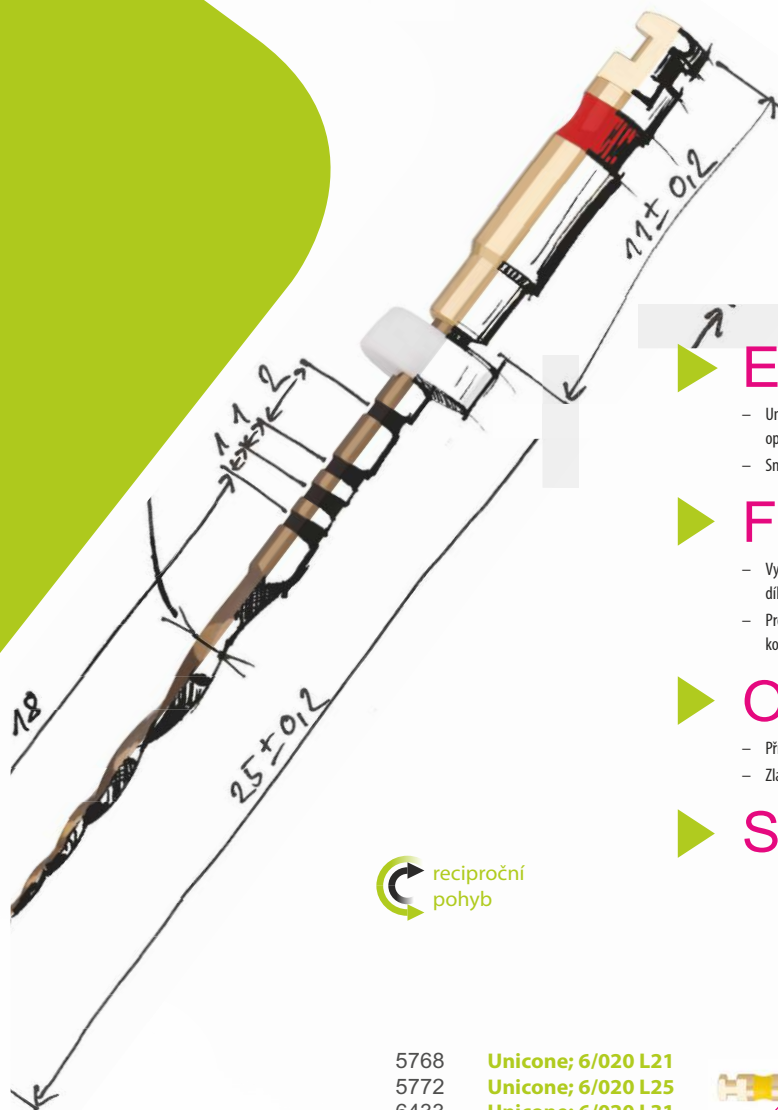

Efektivita

- Unikátní konstrukční řešení nástroje přináší rychlé a bezpečné opracování kanálku recipročním pohybem
- Snadná obturace gutaperčovými čepý s 6% konicitou

Flexibilita

- Vyrobeno z vysoce exibilního Nitinolu s prodlouženou životností díky speciální technologii zpracování
- Proměnný trojúhelníkový prol nástroje zaručuje optimální kombinaci exibility a trvanlivosti

Originalita

- Přitlačná síla a řízení nástroje v rukou stomatologa
- Zlacené kolénko pro lepší ochranu stomatologického násadce

Sterilizovatelnost

5768 **Unicone; 6/020 L21**
 5772 **Unicone; 6/020 L25**
 6433 **Unicone; 6/020 L31**



5769 **Unicone; 6/025 L21**
 5773 **Unicone; 6/025 L25**
 6434 **Unicone; 6/025 L31**



5770 **Unicone; 6/040 L21**
 5774 **Unicone; 6/040 L25**
 6435 **Unicone; 6/040 L31**



balení 6 ks



www.rotadent.eu



info@rotadent.eu



+420 388 323 991

Rotadent spol. s r.o.

Špidrova 104
 Vimperk 385 01
 Czech republic

UNICONE

time for change

Set Unicone I Unicone Set 3 ks

L = 21	6498
L = 25	6499
L = 31	6500



Set Unicone II Unicone Set 6 ks

L = 21	6501
L = 25	5775
L = 31	6502



Set Unicone III Endo Set

L = 21	6504
L = 25	6505
L = 31	6506



Start Kit Unicone

6503



6499	Set Unicone I, L25	1x
5815	Set čepy gutta percha 6/015-040	1x
5895	Set čepy absorbní papírové 6/015-040	1x
	Produktová brožura Unicone	1x
	Návod k použití	1x

Set čepy absorbní papírové 6/015-040



5895

Set čepy gutta percha 6/015-040



5895

Návod k použití

1. Primární zprůchodnění kořenového kanálku pomocí W-File 010.
2. Naměření pracovní délky – Apexlokátor, RTG.
3. Pokud je třeba – rozšíření pomocí ručních nástrojů K-File 015–020.
4. Preparace nástrojem Unicone 6/025 bez nebo pouze s 2–3 pilovacími pohyby. Endomotor může být nastaven na jakýkoli z dostupných programů s recipročním pohybem.
5. Po preparaci cca 1,5–2 mm očistit nástroj a vypláchnout kanálek desinfekčním roztokem. U anatomicky složitějších kanálků zkontrolovat průchodnost kanálku nástrojem W-File.
6. Opakováním bodů 4 a 5 dosáhneme pracovní délky.

Široké kanálky můžeme rozšířit nástrojem Unicone 6/040. Pokud nástroj přestane pronikat, je nutné ihned vyčistit nástroj a kanálek, popřípadě nejdříve rozšířit kanálek nástrojem Unicone 6/020. Při primárním zprůchodňování můžeme u složitějších kanálků s úspěchem použít nástroje WIZARD Navigator W1 a WIZARD Navigator W2. Pro slabé kanálky můžeme obdobným způsobem použít nástroj Unicone 6/020 a plnit gutaperčovým čepem ISO 6/020. U širokých kanálků (řezáky, špičáky) lze vynechat body 1 a 3. Po použití nástroje odkládejte do čistícího boxu a kořenový kanálek důkladně propláchněte roztokem.

výrobce: MEDIN, a.s., Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě



www.rotadent.eu

info@rotadent.eu +420 388 323 991

Rotadent spol. s r.o.

Špidrova 104
Vimperk 385 01
Czech republic