




Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo · Germany
Telefon +49 (0) 5261 701-0
Telefax +49 (0) 5261 701-289
info@kometdental.de
www.kometdental.de



Oddělovací pásky
© Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
301114 - Rev 2016-11

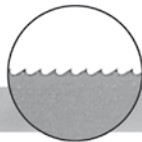

9816.000 Šířka 6 mm Tloušťka 0,05 mm



Oddělovací pásky z nerezové oceli

1. Indikace

Tyto oddělovací pásky jsou zoubkované pouze na jedné straně a mají se používat pilovitými pohyby. (např. náhodně cementované akrylátové nebo porcelánové fazety můstků).

2. Správné použití oddělovacích pásek

Tyto oddělovací pásky jsou zoubkované pouze na jedné straně a mají se používat pilovitými pohyby. Poznámka: oddělovací pásky lze odříznout na požadovanou délku komerčně dostupnými nůžkami. Pozor: chraňte před stykem s dásní – riziko poranění způsobeného ostrými čepeli

3. Přepřacování

Oddělovací pásky se dodávají v nesterilním stavu, a proto se musí před každým použitím vyčistit, dezinfikovat a sterilizovat. Oddělovací proužky se musí ošetřit antikorozními, čistícími a dezinfekčními přípravky pro točivé nástroje (např. Komet DC1). Pokud jde o doporučení pro použití (doba ponoření, koncentrace, vhodnost) čistících a dezinfekčních přípravků viz. návody výrobců. Dezinfekční a čistící přípravky se musí důkladně opláchnout vodou a nástroje se musí důkladně osušit (nejlépe stlačeným vzduchem podle doporučení Komise pro hygienu a prevenci infekčních onemocnění v nemocnicích, Robert Koch Institute). Neuchovávejte oddělovací pásky po dlouhou dobu v mokřím či vlhkém prostředí. Oddělovací pásky nesmí přijít do vzájemného kontaktu během ultrazvukového čištění. Proveďte vizuální kontrolu očištěných nástrojů. Přístroje lze přepřacovávat v termálním

Návod k použití

Čtete pozorně a uchvejte pro budoucí potřebu.

dezinfektoru s tím, že použitý přípravek je vhodný pro rotační nástroje (slabý alkalický detergent). Sterilizace oddělovacích pásek se provádí známými metodami v autoklávu (134°C) podle konvenčních metod. Dodržujte pokyny stanovené výrobcem. Po dokončení sterilizace zkontrolujte, zda povrchy netrpí korozi. Zkorodované oddělovací pásky zlikvidujte. Provozovatel zdravotnických prostředků odpovídá za to, že správné léčebné postupy provádí kvalifikovaný personál s využitím vhodných materiálů a vhodného vybavení dle doporučení Komise pro hygienu a prevenci infekčních onemocnění v nemocnicích, Robert Koch Institute. Informace ohledně správného přepřacování nástrojů podle DIN EN ISO 17664 lze stáhnout z našeho webu nebo si je vyžádat od výrobce, společnosti Gebr. Brasseler.

4. Bezpečnost a odpovědnost

Rovněž viz „Pokyny k používání a bezpečnostní doporučení“ v aktuálním katalogu Komet. Uživatel rovněž odpovídá za kontrolu oddělovacích pásek před použitím a za to, že budou vhodné k danému účelu. Opatřené a poškozené oddělovací pásky (tj. ohnuté atd.) je zapotřebí zlikvidovat a okamžitě nahradit novými. Shora uvedené pokyny se musí přísně dodržovat. Oddělovací pásky používejte pouze podle jejich zamýšleného účelu. Nedodržování těchto bezpečnostních pokynů může vést k poranění. Uživatel odpovídá za kontrolu oddělovacích disků před použitím a ověří si, že budou vhodné k danému účelu. V případě spoluzavinění z nedbalosti uživatele společnost Gebr. Brasseler částečně či celkově odmítá odpovědnost za veškeré následné škody, zvláště za škody způsobené nedodržováním našich doporučení ohledně používání nebo varování a stejně tak i mimovolným použitím k jinému než schválenému účelu uživatelem.

Freigabe | → **Nicht zutreffendes bitte streichen!** Stand 12/16

erstellt	05.04.17	05.04.17	geprüft von
amm – CT amm – JE			
Datum/Unterschrift			
.....			
PM u/o Marketingverantw. Datum/Unterschrift			
Freigabe Marketing Center:			
ab bis			
Freigabe Internet:			
ab bis			
ohne Angabe = Veröffentlichung ab Freigabedatum			
.....			
PE Datum/Unterschrift			
.....			
Verkaufsleiter Datum/Unterschrift			
.....			
TVA/VU/RA/Bereich Datum/Unterschrift			
.....			