



Komet Dental  
 Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG  
 Trophagener Weg 25  
 32657 Lemgo · Germany  
 Telefon+49 (0) 5261 701-0  
 Telefax+49 (0) 5261 701-289  
 info@kometdental.de  
 www.kometdental.de




### Separční disk

© 09/2014, Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG  
 301124 - Rev 09/2014



Ortodoncie

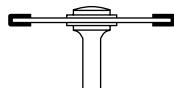

**8934A.900.100**

⊖<sub>max.</sub> 30.000 ot/min ⊖<sub>opt.</sub> 5.000 ot/min

Tabulka 1

**8934A.900.140**

⊖<sub>max.</sub> 30.000 ot/min ⊖<sub>opt.</sub> 5.000 ot/min

**8934A.900.180**

⊖<sub>max.</sub> 25.000 ot/min ⊖<sub>opt.</sub> 5.000 ot/min

**8934A.900.220**

⊖<sub>max.</sub> 20.000 ot/min ⊖<sub>opt.</sub> 5.000 ot/min



Separční disk s diamantovým povlakem pro proximální redukci sklovin

1. Indikace. Interproximální redukce sklovin při ortodontickém ošetření.

### 2. Správné použití

- Separční disk musíte vždy používat s chráničem, aby nedošlo k poranění.
- Umístěte disk okluzně nebo vestibulárně a pomalu jím pohybujte po kontaktní ploše při otáčkách 5000 ot./min.
- Nepřekračujte maximální povolené otáčky (tabulka 1).
- V zájmu minimalizace rizika traumatizace nesmí dojít ke kontaktu s měkkou tkání.
- Musíte používat dostatečné množství chladicí kapaliny.

3. Čištění, dezinfekce a sterilizace. Nástroj se musí ošetřit antikoroziními, dezinfekčními a čistícími přípravky pro točivé nástroje (např. Komet® DC1®). Pokud jde o doporučení pro použití (doba ponoření, koncentrace, vhodnost) dezinfekčních nebo čistících přípravků viz. návody výrobců. Dezinfekční a čistící přípravky se musí důkladně opláchnout vodou a nástroje se musí důkladně osušit (nejlépe stlačeným vzduchem podle doporučení Komise pro hygienu a prevenci infekčních onemocnění v nemocnicích, Robert Koch Institute). Neuchovávejte nástroj po dlouhou dobu v mokřém či vlhkém prostředí. Nástroje nesmí přijít do vzájemného kontaktu během ultrazvukového čištění. Přístroje lze přepracovávat v termálním dezinfektoru s tím, že použitý přípravek je vhodný

### Návod k použití

Čtěte pozorně a uchovejte pro budoucí potřebu.

pro rotační nástroje (slabý alkalický detergent). Proveďte vizuální kontrolu očištěných nástrojů. Jakékoliv poškozené nebo tupé separční disky se musí vyřadit a zlikvidovat. Sterilizace se provádí v autoklávu při 134 °C. Dodržujte pokyny výrobců těchto zařízení. Zkorodované nástroje se musí vyřadit a jejich používání ukončit. Provozovatel zdravotnických prostředků odpovídá za to, že správné léčebné postupy provádí kvalifikovaný personál s využitím vhodných materiálů a vhodného vybavení dle doporučení Komise pro hygienu a prevenci infekčních onemocnění v nemocnicích, Robert Koch Institute. Informace ohledně správné sterilizace nástrojů podle DIN EN ISO 17664 (ČSN EN ISO 17664) lze stáhnout z našeho webu [www.kometdental.de](http://www.kometdental.de) nebo si je vyžádat od výrobce, společnosti Gebr. Brasseler.

### 4. Bezpečnost a odpovědnost

Opotřeбенé a poškozené nástroje (vadný diamantový povlak, ohnuté nástroje atd.) musí být vyřazeny a nahrazeny novými. Shora uvedená doporučení ohledně manipulace, chlazení a kontaktního tlaku se musí přísně dodržovat. Nástroje použijte pouze k zamýšlenému určení. Nedodržování těchto bezpečnostních doporučení může vést k poškození hnacího systému nebo poranění. V případě spoluzavinění z nedbalosti uživatele společnost Gebr. Brasseler částečně či celkově odmítá odpovědnost za veškeré následné škody, zvláště za škody způsobené nedodržováním našich doporučení ohledně používání nebo varování a stejně tak i mimovolným použitím k jinému než schválenému účelu uživatelem.