



Komet Dental  
 Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG  
 Trophagener Weg 25  
 32657 Lemgo · Germany  
 Telefon +49 (0) 5261 701-0  
 Telefax +49 (0) 5261 701-289  
 info@kometdental.de  
 www.kometdental.de



**Hliníkové bloky vrtáčků**  
 © Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG  
 301142 - Rev 2015-12



**Hliníkový blok vrtáčků**

Hliníkový blok vrtáčků Komet je konstruován pro individuální uspořádání nástrojů pro specifické léčebné metody a preparační techniky. Tento blok vrtáčků zajišťuje ergonomický, hygienický a hospodárny postup. Víko v závěsu brání nástrojům ve vypadnutí.

1. Správné použití
  - Uchovávejte blok vrtáčků v původním obalu do prvního použití.
  - V zájmu pohodlné manipulace lze blok vrtáčků vybavit nástroji potřebnými pro individuální léčebné postupy.

2. Přepracování
  - Použitá a nová nástroje lze čistit, dezinfikovat a sterilizovat v bloku vrtáčků. Vhodné používání zabrání poškození bloku vrtáčků.
  - Dezinfekce a čištění v ultrazvukové lázni pouze ve spojení se vhodným dezinfekčním roztokem (např. Komet DC1).
  - Dodržujte pokyny výrobce ohledně kompatibility materiálů, koncentrace a doby ponoření.

**Návod k použití**  
 Čtete pozorně a uchovejte pro budoucí potřebu.

- Bezprostředně po dezinfekci odstraňte veškeré skvrny.
- Důležité: před sterilizací propláchněte blok vrtáčků pod tekoucí vodou a důkladně vysušte, zvláště v perforacích (např. profukováním vzduchem).
- Po propláchnutí a sušení sterilizujte blok vrtáčků v autoklávu při tlaku 2,2 barů a 134°C. Pokud bude blok vrtáčků obsahovat zásadně důležité nástroje (invazivní nástroje), musí se zabalit do sterilizačního vaku. Poznámka: vícenásobné sterilizace bloku vrtáčků mohou způsobit drobné barevné změny. Taková změna barvy nemá žádný vliv na kvalitu či funkčnost bloku vrtáčků. Kvůli materiálu, z něhož je hliníkový blok vrtáčků vyroben, není vhodný k čištění/dezinfekci v tepelném dezinfektoru.

3. Bezpečnost a odpovědnost
  - Uživatel rovněž odpovídá za kontrolu výrobku před použitím a za to, že bude vhodný k danému účelu. Uživatel odpovídá za správné používání bloku vrtáčků. Poškozené blok vrtáčků se musí ihned zlikvidovat a nahradit novými. Nevhodné použití bloku vrtáčků může vést k poškození nástrojů nebo poraněním. V případě spoluzavinění z nedbalosti uživatele společnost Gebr. Brasseler částečně či celkově odmítá odpovědnost za veškeré následné škody, zvláště za škody způsobené nedodržením našich doporučení ohledně používání nebo varování a stejně tak i mimovolným použitím k jinému než schválenému účelu uživatelem.

**Freigabe** | → Nicht zutreffendes bitte streichen! Stand 12/16

erstellt	05.04.17	05.04.17	geprüft von
<b>amm – CT</b>		<b>amm – JE</b>	
Datum/Unterschrift			
.....			
<b>PM u/o Marketingverantw.</b>		Datum/Unterschrift	
<b>Freigabe <u>Marketing Center</u>:</b>			
ab _____ bis _____			
<b>Freigabe <u>Internet</u>:</b>			
ab _____ bis _____			
<b>ohne Angabe = Veröffentlichung ab Freigabedatum</b>			
.....			
<b>PE</b>		Datum/Unterschrift	
.....			
<b>Verkaufsleiter</b>		Datum/Unterschrift	
.....			
<b>TVA/VU/RA/Bereich</b>		Datum/Unterschrift	