



Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo · Germany
Telefon +49 (0) 5261 701-0
Telefax +49 (0) 5261 701-289
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Návod k použití

Čtete pozorně a uchovejte pro budoucí potřebu.

Keramické leštící

© 05/2013, Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

302581 - Rev 05/2013

CS

CS

Leštící nástroje s obsahem diamantové drti pro keramické materiály a keramické fazety

Abrazivní materiál: diamantová drť

1. Předběžné leštění: modrá pro hrubé povrchy a pro tvarování
2. Leštění: růžová pro běžné povrchy
3. Leštění s vysokým leskem: šedá pro jemné povrchy

Poznámka: Některé tvary jsou rovněž k dostání v super hrubé, zelené verzi pro vytvarování.

1. Indikace

Tří až čtyřstupňový leštící systém pro leštění keramických materiálů a keramických fazet. S ohledem na kvalitu leštěného povrchu lze vynechat první nebo první dva kroky (modrá, zelená).

2. Doporučení k použití

Před použitím zkontrolujte vycentrování a bezpečnost leštícího nástroje. Leštící nástroj používejte pouze k určenému účelu a vždy noste bezpečnostní brýle. Pracujte pouze s nízkým kontaktním tlakem ≤ 2 N). K získání rovného povrchu se doporučují kruhové pohyby. Optimální otáčky jsou $\approx 5.000 - 6.000$ ot/min. Nejlepších výsledků dosáhnete dodržováním doporučených otáček. Zvýšený tlak a otáčky povedou k nadměrnému opotřebení a tvorbě tepla, což by nakonec mohlo způsobit destrukci leštícího nástroje. Maximální povolené otáčky jsou uvedeny na štítku.

3. Správné použití

- Zajistěte, aby se používaly pouze technicky a hygienicky dokonalé koncovky.
- Kleštiny se musí pravidelně čistit.
- Leštící nástroj zasunujte co nejhluběji.
- Před vlastním kontaktem nechte leštící nástroj rozběhnout do optimálních otáček.
- Nepřekračujte maximální povolené otáčky!

4. Bezpečnost a odpovědnost

Dodržujte všeobecný návod k obsluze a bezpečnostní doporučení v aktuálním dentálním katalogu Komet. Uživatel odpovídá za kontrolu každého leštícího nástroje před použitím a zajistí, že bude vhodná k danému účelu. Ohnuté nástroje nebo nástroje s porušenou soustředností je zapotřebí zlikvidovat a neprodleně nahradit novými. Nevhodné použití může vést k poškození hnacího systému nebo poranění. V případě spoluzavinění z nedbalosti uživatele společnost Gebr. Brasseler částečně či celkově odmítá odpovědnost za veškeré následné škody, zvláště za škody způsobené nedodržováním našich doporučení ohledně používání nebo varování a stejně tak i mimovolným použitím k jinému než schválenému účelu uživatelem.