



Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo · Germany
Telefon +49 (0) 5261 701-0
Telefax +49 (0) 5261 701-289
info@Kometdental.de
www.kometdental.de



Guttapercha Cutter
309245 - Rev 2013-11



Preparace kořenového kanálku

Návod k použití

Čtěte pozorně a uchovejte pro budoucí potřebu.

CS

Dláto na gutaperču

1. Indikace

Oddělení gutaperčových hrotů obsahujících nosič (s plastovým jádrem) a seříznutí přebytečné kondenzované gutaperči.

2. Kontraindikace

Oddělení gutaperčových hrotů, které nejsou pevně usazeny v hrotu kořenového kanálku

3. Klinický postup/vhodné použití:

Oddělení gutaperčových hrotů obsahujících nosič (s plastovým jádrem). Poté, co zasunutý gutaperčový hrot obsahující nosič vychladne (např. obturátor Komet F360 Fill, 9996), použijte buď GP801L v červeném kolénkovém nástavci vrtačky při optimálních otáčkách \ominus_{opt} 160.000 ot/min nebo v turbíně při otáčkách \ominus_{max} 300.000 ot/min. Práce bez chlazení. Opatrně přitlačte nástroj ke gutaperčovému hrotu na stejné úrovni jako je přístup do kanálku v úhlopříčném směru. Tření vzniklé tlakem způsobí, že gutaperčový hrot roztaje. Oddělený fragment lze pak odstranit. Odříznutí přebytečné gutaperči.

Po mechanické preparaci kořenového kanálku a zasunutí hlavního hrotu s pevným usazením v apexu (např. Komet GPF04, GP02, GP04, GP06, GP08) se nástrojem odstraní viditelná přebytečná gutaperča. Postupujte, jak je shora uvedeno, ale nezapomeňte, že v tomto případě hrot nemá plastové jádro, a je proto pružnější. Z tohoto důvodu se doporučuje pracovat v přerušovaném režimu. Nástroj nepoužívejte v axiálním směru, protože by to mohlo způsobit obalení nadbytečné gutaperči okolo krčku nástroje. Tento efekt omezíte tím, že gutaperčový hrot hrubě seříznete například skalpelem před použitím GP80 1L. Všeobecně se doporučuje pracovat s kofferdamem. Oddělená gutaperča by mohla uniknout při jediném pohybu, pokud se používá GP801L. Použití kofferdamu zajišťuje, že lze oddělený fragment naprosto bezpečně odstranit.

4. Další léčba

Další léčba vyplněného kanálku probíhá například dočasným cementem.

5. Doporučení pro údržbu

Kořenové nástroje je nutné dezinfikovat antikorozními dezinfekčními a čisticími přípravky pro točivé nástroje (např. Komet DC1). Doporučení pro použití (doba ponoření, koncentrace, vhodnost) dezinfekčních a čisticích přípravků viz. návody výrobců těchto použitých přípravků. Dezinfekční a čisticí přípravky se musí důkladně opláchnout vodou a nástroje se musí pečlivě osušit (např. vzduchovou tryskou). Neuchovávejte nástroje po dlouhou dobu v mokřem či vlhkém prostředí. Vrtáky nesmí přijít do vzájemného kontaktu během čištění v ultrazvukové lázni. Přístroje lze přepracovávat v termálním dezinfektoru s tím, že použitý preparát je vhodný pro rotační nástroje (slabý alkalický detergent). Proveďte vizuální kontrolu přístrojů. Poškozené nebo otupené nástroje se musí zlikvidovat a jejich používání ukončit. Přístroje se sterilizují v autoklávu při teplotě 134°C. Dodržujte pokyny stanovené výrobcem zařízení. Žádné zkorodované nástroje nepoužívejte opakovaně. Provozovatel zdravotnických prostředků odpovídá za to, že správné léčebné postupy bude provádět kvalifikovaný personál s využitím vhodných materiálů a vhodného vybavení. Pracovní pokyny ohledně správného přepracování nástrojů podle DIN EN ISO 17664 lze stáhnout z webu www.kometdental.de nebo si je vyžádat od výrobce, společnosti Gebr. Brasseler.

6. Bezpečnost a odpovědnost

Opotřebené a poškozené nástroje (vadný diamantový povlak, ohnuté nástroje atd.) je zapotřebí zlikvidovat a nahradit novými. Shora uvedené pokyny týkající se nakládání s nástroji, chlazení a kontaktního tlaku se musí přísně dodržovat. Nástroje používejte pouze podle jejich zamýšleného účelu. Nedodržování těchto bezpečnostních pokynů může vést k poranění nebo poškození hncí soustavy. Uživatel odpovídá za kontrolu výrobků před použitím a zajistí, že budou vhodné k danému účelu. V

případě spoluzavinění z nedbalosti uživatele společnost Gebr. Brasseler částečně či celkově odmítá odpovědnost za veškeré následné škody, zvláště za škody způsobené nedodržováním našich doporučení ohledně používání nebo varování a stejně tak i mimovolným použitím k jinému než schválenému účelu uživatelem.

Freigabe | → Nicht zutreffendes bitte streichen! Stand 12/16

erstellt	26.04.17	26.04.17	geprüft von
amm – CT		amm – JE	
Datum/Unterschrift			
.....			
PM u/o Marketingverantw.		Datum/Unterschrift	
Freigabe Marketing Center:			
ab _____		bis _____	
Freigabe Internet:			
ab _____		bis _____	
ohne Angabe = Veröffentlichung ab Freigabedatum			
.....			
PE		Datum/Unterschrift	
.....			
Verkaufsleiter		Datum/Unterschrift	
.....			
TVA/VU/RA/Bereich		Datum/Unterschrift	