



Komet Dental  
 Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG  
 Trophagener Weg 25  
 32657 Lemgo · Germany  
 Telefon +49 (0) 5261 701-0  
 Telefax +49 (0) 5261 701-289  
 info@kometdental.de  
 www.kometdental.de



Nástroj s malou hlavou  
 303258 - 2015-01



Preparace dutiny

### Návod k použití

Čtěte pozorně a uchvejte pro budoucí potřebu.

CS

Standardní diamantové nástroje v malých velikostech

#### 1. Indikace

Nástroje jsou navrženy pro minimálně invazivní preparaci dutiny, t. pro otevření minimálních kazových defektů a pro těžko přístupné preparace.

#### 2. Kontraindikace

- Preparace vyžadující vysoký kontaktní tlak během preparace (> 2 N), rychlé zmenšení zubní hmoty, vyvrátání a odstraňování výplňových materiálů.  
 - Léčby, kde by mohlo dojít ke vzpříčení nástrojů nebo k páčení.

#### 3. Správné použití

- Doporučuje používat nástroje s dřikem FG (314) při otáčkách  $\varnothing_{opt}$  160.000 ot/min v červeném kolénkovém násadci na vrtačku a nástroje s dřikem RA (204) při otáčkách  $\varnothing_{opt}$  40.000 ot/min.  
 - Kromě těchto všeobecných údajů dodržujte individuální otáčky vyznačené na obalu.  
 - Kvůli malým rozměrům nástrojů používejte jen minimální kontaktní tlak (< 2 N), aby se nástroje předčasně neztopily nebo nerozlomily.  
 - Vždy používejte dostatečné množství rozstříkované chladicí kapaliny (nejméně 50 ml/min).  
 - Pro ochranu maximálního množství zdravé zubní hmoty se doporučuje používat lupu.

#### 4. Čištění, dezinfekce a sterilizace

Nástroje je nutné dezinfikovat antikorozními dezinfekčními a čisticími přípravky pro točivé nástroje (např. Komet DC1). Doporučení pro použití (doba ponoření, koncentrace, vhodnost) dezinfekčních a čisticích přípravků viz. návody výrobců těchto přípravků. Dezinfekční a čisticí přípravek odstraníte důkladným opláchnutím nástrojů vodou a důkladným osušením. Neuchovávejte nástroje po delší dobu v mokřem či vlhkém prostředí. Nástroje nesmí přijít do vzájemného kontaktu během ultrazvukového čištění. Přístroje lze přepracovávat v termálním dezinfektoru s tím, že použitý přípravek je vhodný pro rotační

nástroje (slabý alkalický detergent). Vyčištěné nástroje se musí vizuálně zkontrolovat. Poškozené nebo otupené nástroje se musí odmítnout a jejich používání ukončit. Sterilizace se provádí v autoklávu při 134°C. Dodržujte doporučení stanovená výrobcem příslušného zařízení. Jakékoliv zkorodované nástroje zlikvidujte. Provozovatel zdravotnických prostředků odpovídá za to, že správné léčebné postupy provádí kvalifikovaný personál s využitím vhodných materiálů a vhodného vybavení dle doporučení Komise pro hygienu a prevenci infekčních onemocnění v nemocnicích, Robert Koch Institute. Pracovní pokyny ohledně správného přepracování nástrojů podle DIN EN ISO 17664 lze stáhnout z webu www.kometdental.de nebo si je vyžádat od výrobce, společnosti Gebr. Brasseler.

#### 5. Bezpečnost a odpovědnost

Opatřené a poškozené nástroje (vadný diamantový povlak, ohnuté nástroje atd.) musí být odmítnuty a nahrazeny novými. Shora uvedená doporučení ohledně manipulace, chlazení a kontaktního tlaku se musí přísně dodržovat. Nástroje používejte pouze k zamýšlenému určení. Nedodržování těchto bezpečnostních doporučení může vést k poškození násadce nebo poranění. Uživatel rovněž odpovídá za kontrolu výrobku před použitím a za to, že bude vhodný k danému účelu. V případě spoluzavinění z nedbalosti uživatele společnost Gebr. Brasseler částečně či celkově odmítá odpovědnost za veškeré následné škody, zvláště za škody způsobené nedodržováním našich doporučení ohledně používání nebo varování a stejně tak i mimovolným použitím k jinému než schválenému účelu uživatelem.

## Freigabe → Nicht zutreffendes bitte streichen!

Stand 12/16

erstellt

03.04.17

03.04.17

geprüft von

amm – CT amm – JE

Datum/Unterschrift

PM u/o Marketingverantw. Datum/Unterschrift

Freigabe **Marketing Center:**

ab \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

Freigabe **Internet:**

ab \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

**ohne Angabe = Veröffentlichung ab Freigabedatum**

PE Datum/Unterschrift

Verkaufsleiter Datum/Unterschrift

TVA/VU/RA/Bereich Datum/Unterschrift