



Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo · Germany
Telefon +49 (0) 5261 701-0
Telefax +49 (0) 5261 701-289
info@kometdental.de
www.kometdental.de



Léčba periimplantitidy
312065 - Rev 2015-11



Chirurgie v ústní dutině

Návod k použití

Čtěte pozorně a uchovejte pro budoucí potřebu.



H379.310.014/023

○_{opt.} 40.000 ot/min

H379UF.310.014/023

○_{max.} 80.000 ot/min



H48L.310.014/023

○_{opt.} 40.000 ot/min

H48UF.310.014/023

○_{max.} 80.000 ot/min

CS

Wolframové nástroje pro práci s titanem jako součást periimplantační léčby

1. Indikace

Intraorální práce na titanových implantátech rotačními nástroji jako součást léčby periimplantitidy. Mechanické čištění a vyhlazení povrchu implantátu.

2. Kontraindikace

Implantáty o velikosti menší než 3,4 mm a/nebo v případě, že čištění pravděpodobně nadměrně oslabí profil implantátu. Příprava implantátů s nedostatečnou stabilitou.

3. Omezené indikace

- Bruxismus
- Systémová onemocnění (diabetes mellitus, chemoterapie, osteoporóza, terapie bifosfonáty)
- Nedostatečná spolupráce ze strany pacienta

4. Přípravná opatření

- Sondáž měkké tkáně
- Pokyny ohledně správné ústní hygieny
- Čištění a dezinfekce periimplantátových chobotů a fotodynamická terapie, pokud bude nezbytná
- Zobrazovací diagnostika (nejlépe rentgeny – díky citlivosti na artefakty v oblasti titanu, DVT je vhodná pouze v omezeném rozsahu)
- Chirurgické obnažení oblasti okolo implantátu, který se má léčit

5. Klinický postup

V závislosti na dostupnosti implantátu a krčku/schůdku implantátu se použijí nástroje buď ve tvaru vejce (obr. H379), nebo ve tvaru plamene (obr. H48). Nástroje pracují v rotačním režimu s nízkým kontaktním tlakem (< 2 N) a s dostatečným množstvím sterilního fyziologického roztoku (> 50 ml/min). Jsou určeny pro použití v červeném lomeném násadci při otáčkách 40 000 ot/min. Titanový povrch se poté ošetří nástrojem příslušného tvaru s ultrajemným ozubením (obr. 379UF, H48LUF) při optimálních otáčkách 40.000 ot/min. Díky jemnějšímu povrchu je sníženo riziko tvorby nežádoucích depozitů na povrchu implantátu. Nástroje by se nejlépe měly používat proti směru hodinových ručiček, aby se snížilo riziko posouvání nástroje během léčby a zaručila se vynikající kontrola nástrojů. Jakmile bude práce dokončena, lze jakékoliv titanové částice odstranit z povrchu měkké tkáně sterilními pěnovými peletami nebo malým leštičím kartáčkem.

6. Další léčba

- Případné podání antibiotika
- Pacient používá týden ústní vodu k výplachu, která obsahuje CHX
- Kontrolní návštěva

7. Doporučení pro údržbu

Tyto nástroje se dodávají nesterilní a musí se před prvním použitím připravit. Nástroje se musí po každém použití dezinfikovat antikorozními dezinfekčními a čistícími přípravky pro točivé nástroje (např. Komet DC 1). Doporučení pro použití (doba ponoření, koncentrace, vhodnost) dezinfekčních a čistících přípravků jsou uvedena v návodech výrobců těchto přípravků. Nástroje se sterilizují obvyklým způsobem. Provozovatel zdravotnických prostředků odpovídá za to, že správné léčebné postupy provádí kvalifikovaný personál s využitím vhodných materiálů a vhodného vybavení dle doporučení Komise pro hygienu a prevenci infekčních onemocnění v nemocnicích, Robert Koch

Institute. Pracovní pokyny ohledně správného přepracování nástrojů podle DIN EN ISO 17664 lze stáhnout z webu www.kometdental.de nebo si je vyžádat od výrobce, společnosti Gebr. Brasseler.

8. Bezpečnost a odpovědnost

Opotřeбенé a poškozené nástroje musí ihned být odmítnuty a nahrazeny novými. Pokyny týkající se nakládání s nástroji, chlazení a kontaktního tlaku se musí přísně dodržovat. Nástroje používejte pouze k určenému účelu. Nedodržování těchto bezpečnostních pokynů může vést k poranění nebo poškození násadce. Rovněž viz všeobecná doporučení, kde jsou pokyny k používání a bezpečnosti, v aktuálním katalogu Komet nebo náš web www.kometdental.de. Uživatel rovněž odpovídá za kontrolu výrobků před použitím a za to, že budou vhodné k danému účelu. V případě spoluzavinění z nedbalosti uživatele společnost Gebr. Brasseler částečně či celkově odmítá odpovědnost za veškeré následné škody, zvláště za škody způsobené nedodržováním našich doporučení ohledně používání nebo varování a stejně tak i mimovolným použitím k jinému než schválenému účelu uživatelem.

Freigabe → Nicht zutreffendes bitte streichen! Stand 12/16

erstellt	13.04.17	geprüft von	13.04.17
amm – CT		amm – JE	
		Datum/Unterschrift	
.....			
PM u/o Marketingverantw.		Datum/Unterschrift	
Freigabe Marketing Center:			
ab _____ bis _____			
Freigabe Internet:			
ab _____ bis _____			
ohne Angabe = Veröffentlichung ab Freigabedatum			
.....			
PE	Datum/Unterschrift		
.....			
Verkaufsleiter	Datum/Unterschrift		
.....			
TVA/VU/RA/Bereich	Datum/Unterschrift		